

MODE D'EMPLOI:

Mode d'emploi de l'adhésif sans solvant Bond-1[®] SF

L'adhésif sans solvant *Bond-1* SF est un agent de liaison sans solvant à un seul composant d'automordançage photo-polymérisant. En retirant le solvant (par ex. acétone, alcool, eau, etc.), il élimine la nécessité de séchage à l'air libre, ce qui permet d'économiser un temps précieux d'opération en fauteuil, à la fois pour le patient et pour le clinicien. De plus, la couche adhésive ainsi formée élimine l'« absorption de l'eau » et conserve l'intégrité des interfaces de liaison. L'adhésif sans solvant *Bond-1* SF est conçu pour la restauration composite directe et démontre des forces de liaison élevées sur la dentine et l'émail.

INDICATIONS:

- Restaurations composites directes
- Agent de liaison destiné à la réparation de substrats composites, en céramique et en métal
- Compatible avec des matériaux bi-polymérisants uniquement lorsque la couche initiale est photodéclenchée

CONTRE-INDICATIONS:

- Ne pas utiliser sur les patients présentant des allergies connues aux résines de méthacrylate
- Ne pas utiliser avec des matériaux auto-polymérisant uniquement
- Ne pas utiliser sur la pulpe exposée
- Déconseillé sur un émail brut

Conservation et manipulation:

Conserver entre 2° et 12°C. Utiliser à température ambiante.

MODE D'EMPLOI:

1. Préparer la dent conformément aux principes de dentisterie adhésive. Veiller à nettoyer et à retirer soigneusement les débris de surface du site de préparation.
2. Utiliser de l'air sans huile pour sécher la dent pendant 2 à 3 secondes ou utiliser une paillette absorbante pour sécher la dent. Aucune trace d'eau ne doit être visible à la surface de la dent, mais ne pas sécher cette dernière excessivement.
3. **Dose unique:** tordre la partie supérieure du tube à dose unique jusqu'à ce qu'elle se détache. Plonger le micro-pinceau dans la dose unique, puis bien le sécher.

Seringue: retirer le capuchon et placer une pointe d'aiguille floquée de 25 g dans la seringue. S'assurer que l'extrémité est fixée en place. Distribuer et réparer le matériau lentement, par la pointe de l'aiguille, contre la surface de la dent.

4. Appliquer une couche d'agent de liaison sur toute la surface de la dent en utilisant un mouvement de rotation pour répartir le matériau uniformément et complètement.
5. À l'aide de la pointe d'aiguille ou du micro-pinceau pour dose unique, continuer à frotter le matériau sur la surface de la dent pendant 20 secondes.
6. Photo-polymériser pendant 10 secondes.
7. Appliquer le composite conformément aux instructions du fabricant.
8. Replacer le capuchon et éliminer la pointe de l'aiguille après usage. La dose unique doit être éliminée après utilisation.