


**MODE D'EMPLOI :**

Application:

1. Sélectionner une chape de préparation préformée.
2. Remplir la chape préformée de composite photopolymérisable ou autopolymérisable.
3. Placer la chape sur la dent et le tenon du canal radiculaire.
4. Après avoir polymérisé le composite, retirer la chape préformée.
5. Finir la préparation dans la zone cervicale et occlusale.

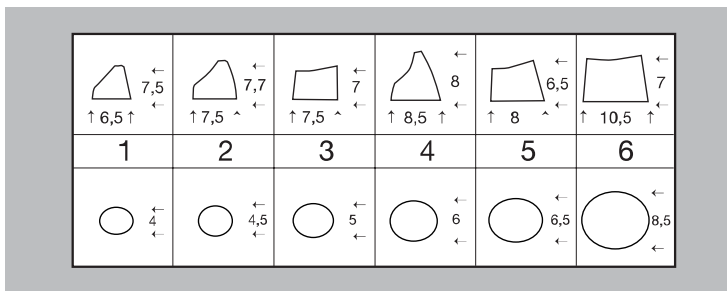

Recharges:

Taille 1 – Petite antérieure

Taille 4 – Grosse canine

Taille 2 – Moyenne antérieure

Taille 5 – Petite/moyenne molaire

Taille 3 – Prémolaire

Taille 6 – Grosse molaire

Non stérile. À usage unique.

Si un matériau photopolymérisable est utilisé, doubler le temps d'exposition.