

Protect-It[®] MODE D'EMPLOI

1. Finir et polir la restauration en composite. Rincer et sécher. S'il s'agit de sceller une ancienne reconstitution, nettoyer à la ponce, puis rincer et sécher.
2. Appliquer l'acide phosphorique à 37% contenu dans le coffret sur les surfaces de composite et l'étaler pour couvrir environ 2mm de l'émail adjacent aux limites de la restauration. Attendre 20 seconds et rincer abondamment pour éliminer l'agent de mordantage.
3. Appliquer *Protect-It* avec l'applicateur inclus dans le coffret. S'assurer que toute la surface de la restauration les parties adjacentes soient recouvertes du produit. Étaler avec un jet d'air.
4. Photopolymériser *Protect-It* pendant 20 secondes.
5. Il n'est pratiquement pas nécessaire de finir ou de polir.

