

MODE D'EMPLOI :

Indications :

1. Le désensibilisant Quell™ est idéal pour une utilisation sur les surfaces de dentine exposées et sensibles, en particulier en présence d'érosion au niveau du collet.
2. *Quell* peut être utilisé sous des amalgames ou des couronnes et des bridges, lorsqu'une cimentation conventionnelle est utilisée (phosphate de zinc, verre ionomère, etc.).
3. *Quell* peut être utilisé pour traiter les préparations de couronnes avant la mise en place des temporaires pour éliminer la sensibilité.
4. *Quell* peut être utilisé avant ou après blanchiment d'une dent vivante.

Désensibilisateur *Quell* Mode d'emploi

1. Nettoyez et séchez la zone de la dent à traiter. (Cette opération est facultative et a pour but de déshydrater la couche superficielle de la surface sensible de la dentine).
2. Pressez quelques gouttes de la **solution A** dans une **alvéole A**. Trempez une micro-brosse dans cette solution et brossez délicatement la surface sensible de la dent pendant 5 à 10 secondes.
3. Répétez encore deux fois le point 2 et maintenez la surface humide.
4. Pressez quelques gouttes de la **solution B** dans une **alvéole B**. Trempez une autre micro-brosse dans la **solution B** et brossez à nouveau pendant 5 à 10 secondes la surface déjà traitée avec la solution A.
5. Répétez encore deux fois le point 4. (Il est possible de cracher après l'application mais il ne faut pas rincer.)
6. Évitez ensuite de boire ou de manger pendant 15 minutes.
7. Si la procédure est utilisée avant de mettre en place une restauration, sécher à l'air la surface et effectuer la restauration.

REMARQUE : Mettre du désensibilisant *Quell* sur une surface à coller affaiblira la solidité du collage.

