




1  
Isoler la préparation par tout moyen utile (digue)

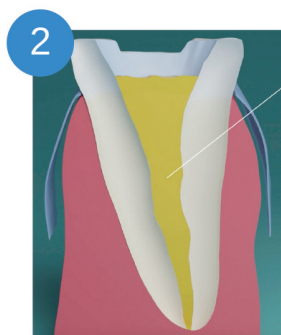


2  
Désobturer et nettoyer en utilisant un insert ultrasonique diamanté sur au moins 1,5 fois la hauteur coronaire.

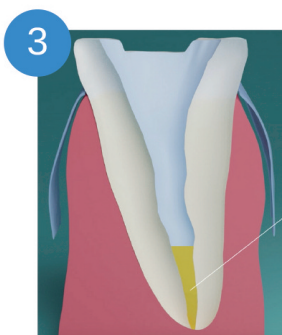

3  
Laisser un bouchon apical de 5mm

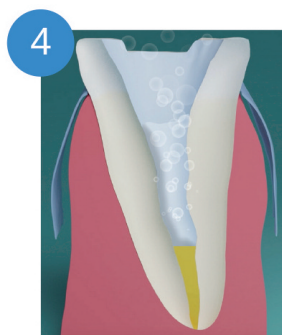


4  
Rincer et sécher à l'air sec

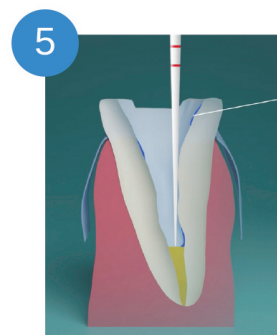


5  
Élimination des résidus humides par application de cônes papier




6  
Clipser l'indicateur de taille sur le capteur radio intra oral

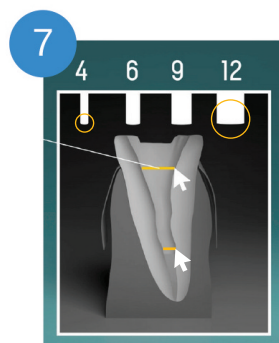

7  
Mesurez la largeur à l'entrée du canal et la largeur à l'apex - pour déterminer le nb de micro-tenons à utiliser

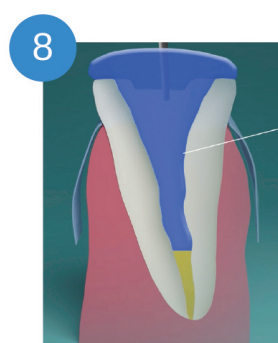

8  
Mordancer les surfaces destinées au collage.  
Rincer et sécher

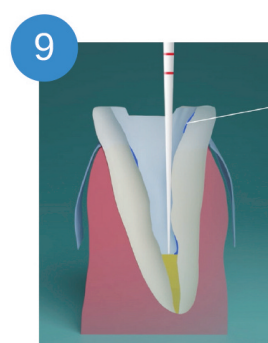


9  
Enlever tout résidu humide avec un cône papier




10  
Enduire les parois canalaires avec un adhésif dual cure universel. Sécher à l'air sec




11  
Remplissage rétrograde en partant du fond du canal en débordant sur les surfaces coronaires préparées

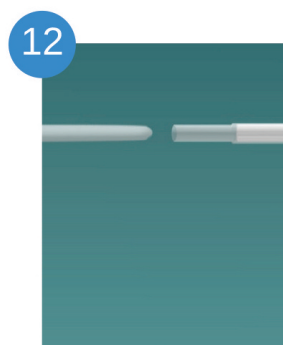


12  
Insérer l'embout extra-fin dans l'imprégnateur

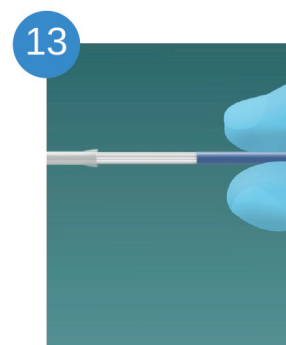


13  
Retirer le Biolight Drill Free sur 2/3 de la longueur sans le sortir de son imprégnateur

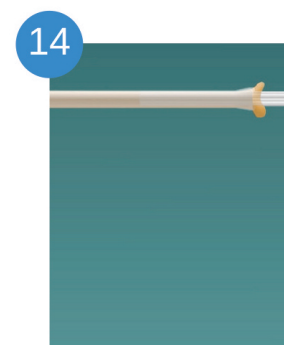


14  
Injecter la colle composite à l'aide de la seringue jusqu'à apparition à l'autre extrémité

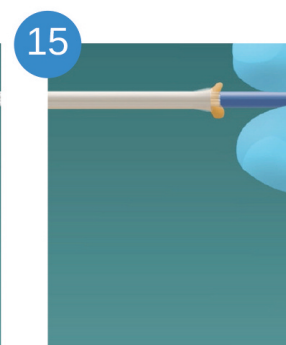


15  
Pousser le Biolight Drill Free dans son imprégnateur tout en maintenant la pression sur la seringue

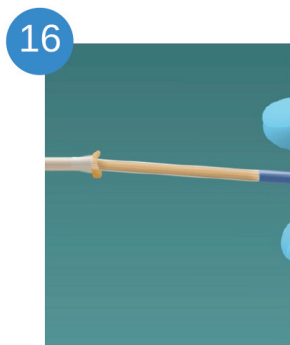


16  
Relâcher le Biolight Drill Free et continuer à injecter : le Biolight sort naturellement de son imprégneur

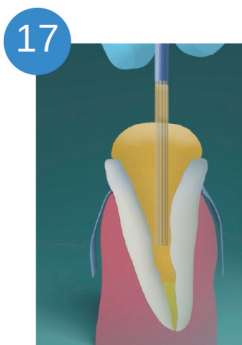


17  
Insérer le Biolight Drill Free dans le canal. Ne pas forcer vers la guetta pour ne pas coincer les brins

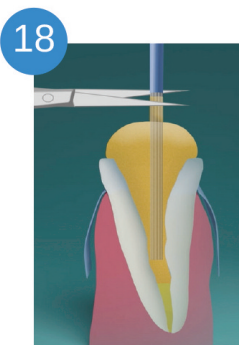


18  
Sectionner avec des ciseaux fins pour libérer les micro-tenons de leur gaine

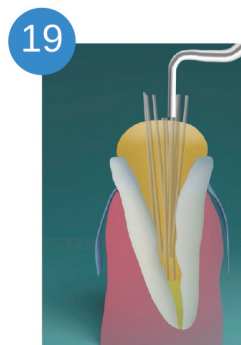


19  
Pousser en translation verticale à l'aide d'un fouloir. Choisir les plus centraux

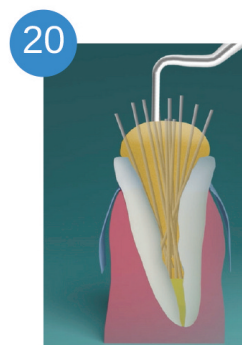


20  
Verser les brins en direction des bords du canal pour les mettre en "bouquet"

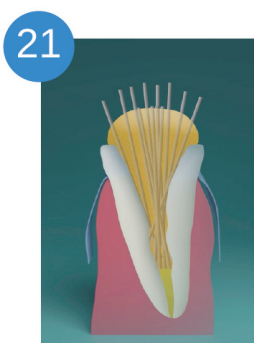

21  
Attendre la complète polymérisation du composite de collage (4 à 5 minutes)

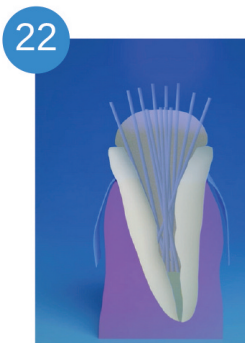

22  
Photopolymériser

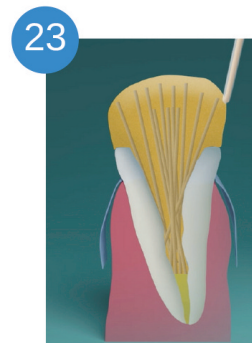

23  
Compléter avec du composite si nécessaire

