

Fabriqué en Allemagne

SYNCA

337 Marion, Le Gardeur
QC, Canada, J5Z 4W8

DESCRIPTION DU PRODUIT

STiK!® SE 1 est un système d'adhésion auto-adhésif photopolymérisable à une seule bouteille très simple à utiliser. Il est conçu pour offrir une puissante adhésion à des résines composites, à l'émail et à la dentine.

STiK!® SE 1 est compatible avec toutes les marques de composites photopolymérisables sur le marché.

INDICATIONS

Système adhésif pour: restaurations en composites avec des composites photopolymérisables

EFFETS SECONDAIRES

Dans certains cas isolés, STiK!® SE 1 peut causer une réaction allergique chez les patients hypersensibles à l'un ou l'autre des ingrédients. Dans de tels cas, le matériau ne devrait pas être utilisé. Les irritations causées par un contact direct avec la pulpe ne peuvent être exclues. Par conséquent, pour protéger la pulpe, le fond de la cavité dans des cas impliquant des excavations profondes doit être recouvert avec une fine couche de matériau en hydroxyde de calcium.

INCOMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES MATÉRIAUX

N'utilisez pas le produit avec des substances contenant de l'eugénol, car ce dernier inhibe la polymérisation de STiK!® SE 1. Évitez d'entreposer le matériau près de produits contenant de l'eugénol et ne laissez pas le matériau entrer en contact avec des matériaux contenant de l'eugénol.

APPLICATION

1. Isolation

La digue est la méthode recommandée d'isolement.

2. Préparation de la cavité

Nettoyez la dent avec de la pierre ponce et rincez à l'eau avant la préparation. Préparez la cavité avec une réduction minimale de la dent. Les marges doivent avoir un léger (0,5 - 1,0mm) biseau placé dans l'émail pour augmenter la surface de liaison avec plus de résistance.

3. Protection de la pulpe

La base de la cavité des excavations profondes doit être recouverte d'une fine couche d'une matière résistante en hydroxyde de calcium.

4. Application du STiK!® SE 1

Appliquez STiK!® SE 1 avec une brosse sur la surface humide de l'émail de la dentine pendant 30 secondes, toujours en mouvement.

Le matériau devrait former une couche homogène. Utilisez un léger jet d'air pendant 10 secondes afin d'éliminer tout composant volatil et de disperser l'adhésif. Photopolymérisez avec une lampe halogène dentaire pendant 20 secondes avant de placer le matériau de restauration.

5. Restauration, polymérisation et finition

Consultez les instructions du fabricant pour la restauration, la polymérisation et la finition des matériaux de restauration utilisés.

De meilleurs résultats sont obtenus avec l'application d'une fine couche de composite fluide suivie par l'application d'un composite malléable. Photopolymérisez chaque couche de composite séparément selon les modes d'emploi correspondants.

PRÉCAUTIONS

- Le matériau non polymérisé pourrait avoir un effet irritant et entraîner une réaction allergique avec les méthacrylates.
- Évitez tout contact avec la peau, la membrane muqueuse et les yeux.
- Si le matériau entre en contact avec la peau, lavez-la immédiatement avec de l'eau et du savon. Si le matériau entre en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement avec une bonne quantité d'eau et consultez un médecin, au besoin.
- Les gants médicaux commerciaux ne protègent pas contre l'effet allergène des méthacrylates.

ENTREPOSAGE

Ne conservez pas le produit à plus de 25°C (78°F)! Évitez de l'exposer directement au soleil. N'utilisez pas le produit après la date d'expiration.

GARANTIE

Synca garantit que ce produit sera exempt de défaut matériel ou de fabrication. Synca ne fait aucune autre garantie incluant des garanties implicites de marchands ou d'adaptation à un usage particulier. L'utilisateur est responsable de déterminer la pertinence de l'application de ce produit. Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, votre seul recours et la seule obligation de Synca seront la réparation ou le remplacement du produit Synca.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Sauf interdiction par la loi, Synca ne sera pas tenu responsable de toute perte ou tout dommage découlant de ce produit, qu'ils soient directs, indirects, particuliers, accidentels ou conséquents, quels que soient les arguments avancés, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la responsabilité objective.

**Conserver hors de la portée des enfants!
Pour usage dentaire seulement!**