

MODE D'EMPLOI :
**Cément temporaire CMT TempSpan®
Cément translucide temporaire TempSpan®**

Les ciments temporaires TempSpan sont des ciments sans eugenol à base de résine conçus pour assurer une restauration provisoire. Ces deux ciments offrent notre seringue jumelée munie de pointes d'auto-mélangeage qui vous permet d'injecter le ciment directement dans la restauration provisoire.

Mode d'emploi
Indications

- Cémentation de couronnes, de ponts, d'inlays et d'appositions

Contre-indications

- Cémentation permanente des restaurations durables
- Cémentation temporaire de facettes provisoires

Dans des températures optimales de mélangeage, soit de 70 à 77 degrés Fahrenheit (de 21 à 25 degrés celsius) et une humidité relative variant de 40 à 60%, on obtient un temps de début et de fin de travail et de prise comme suit.

Cément temporaire

Cément temporaire CMT TempSpan®

Temps de travail

 Entre 1 minute
et 1 ½ minutes
≥ 1 ½ minutes

Temps de prise

 Entre 2 ½ minutes
et 3 minutes
≤ 5 ½ minutes

Cément translucide temporaire TempSpan®

1. Avant de placer la pointe de mélangeage sur la seringue, exprimer du ciment jusqu'à ce que le débit soit uniforme des deux côtés.
2. Asséchez la dent parée et la surface interne de la restauration.
3. En exerçant une légère pression, éjectez une fine couche du ciment temporaire TempSpan® directement dans la restauration provisoire.
4. En respectant le temps de travail stipulé, fixez soigneusement et fermement la restauration provisoire en place dans l'espace paré.
5. Indiquez au patient de refermer doucement la mâchoire sur la restauration provisoire jusqu'à ce que celle-ci soit entièrement installée.
6. Nettoyez tout excédent de ciment temporaire TempSpan® au moyen d'un coton-tige avant que le ciment se fixe.
7. Le ciment temporaire TempSpan® CMT se fixera dans environ 2 ½ à 3 minutes à partir du mélangeage initial. Le ciment temporaire translucide TempSpan® se fixera dans environ 5 ½ minutes à partir du mélangeage initial. Le ciment temporaire translucide TempSpan® peut être également polymérisé pendant 20 secondes par surface afin d'accélérer le temps de fixation du ciment.
8. Retirez le ciment fixé au moyen d'un détartreur ou de tout autre instrument approprié.

MISE EN GARDE

Les ciments temporaires TempSpan® contiennent des résines méthacryliques. Les résides méthacryliques non polymérisés peuvent occasionner de la dermatite de contact et endommager la pulpe dentaire. Évitez tout contact prolongé avec la peau, les yeux et les tissus mous. Lavez la partie affectée à grande eau après tout contact.

ENTREPOSAGE

Entreposez à la température ambiante.

DURÉE DE CONSERVATION

Consultez l'emballage extérieur pour la date limite d'utilisation. N'utilisez pas ce produit au-delà de sa date limite d'utilisation.