



brilliance!  
XPRESS

Un système de blanchiment à domicile  
professionnel **ACTIVÉ À LA LUMIÈRE**

brilliance!  
XPRESS

**MODE D'EMPLOI**



1-800-667-9622  
[www.synca.com](http://www.synca.com)

337 Marion, Le Gardeur, QC, Canada, J5Z 4W8



## INGRÉDIENTS:

Glycérine, peroxyde de carbamide (35%), propylène glycol, eau, carbomère, nitrate de potassium, triéthanolamine, saccharinate de sodium, sorbate de potassium, saveur (arôme).

## PRÉCAUTION:

À utiliser à des fins esthétiques seulement. Le produit n'est pas recommandé pour les patientes enceintes, qui allaitent, ni pour les patients âgés de moins de 14 ans. Évitez de l'utiliser si un patient est allergique à un des ingrédients qu'il renferme. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement. Entreposez le produit dans un endroit frais.

De multiples traitements quotidiens pourraient causer de la sensibilité dentaire et gingivale. Si vous éprouvez de la sensibilité, veuillez vous abstenir d'utiliser le produit pendant une journée. Si la sensibilité persiste, consultez votre dentiste.

## MODE D'EMPLOI

Ouvrez le compartiment du bas de la pile de la lumière de blanchiment au LED, puis retirez le revêtement plastique (une pile supplémentaire est fournie pour une utilisation future).

Raccordez la gouttière de blanchiment à la lumière au LED en insérant un côté de la lumière dans la gouttière, puis tirez l'autre côté par-dessus.

Appliquez une fine couche de gel Brilliance Xpress à l'avant de la gouttière (faites-le pour les deux arcades).

**Note:** Ne remplissez pas la gouttière à l'excès. Mettez la lumière en marche, puis insérez la gouttière dans votre bouche. Faites bouger la gouttière d'un côté à l'autre pour vous assurer que le gel recouvre toutes les surfaces des dents.

**Note:** Le temps de traitement recommandé est de 20 minutes. Toutefois, la lumière au LED se fermera automatiquement toutes les 10 minutes.

Après le traitement, retirez la gouttière, rincez votre bouche avec de l'eau chaude, puis brossez vos dents pour enlever tout excès de gel.

Pour obtenir un résultat optimal, le traitement peut être répété immédiatement en remplissant de nouveau la gouttière avec du gel.

### Entretien:

Cette trousse permet d'effectuer de 8 à 12 traitements à double arcade, selon la quantité de gel utilisée. Appliquez uniquement une petite quantité de gel à l'avant de la gouttière. Continuez le traitement jusqu'à ce que vous obteniez la nuance désirée. Contactez votre dentiste pour obtenir du gel additionnel, au besoin.