

MODE D'EMPLOI:

Matériel d'impression nano-renforcé et hydrophilique à séchage rapide Correct Plus™

Stockage et mode d'emploi :

Stocker et utiliser le matériel d'impression *Correct Plus* Fast Set à 18° - 24° C (65° - 75° F)

Indications

- Impressions pour 1-3 unités.
- Duplication de modèles en pierre.

Contre-indications

- À cause de son temps de travail rapide, le matériel d'impression *Correct Plus* Fast Set n'est pas recommandé pour des impressions à arche complète. Pour des impressions à arche complète, utiliser le matériel d'impression à séchage standard *Correct Plus*.

Remarques :

- Les agents hémostatiques et les cordes de rétraction qui contiennent du sulfate ferrique peuvent inhiber le séchage du matériel d'impression. Avant de prendre l'impression, rincer la zone de préparation soigneusement avec de l'eau afin d'enlever tous contaminants résiduels.
- Les modèles peuvent être coulés 15 minutes après l'enlèvement de l'impression à partir de la bouche.
- À cause de sa rigidité, faire attention lors de l'utilisation du mastic de mélange automatique *Correct Plus* Fast Set sur des dents avec des problèmes periodontiques ou sur des ponts sauf si la zone grave de contre-dépouille sous les pontiques est bloquée.

Description du produit :

Mastic de mélange automatique - matériel à viscosité lourde ayant une dureté de haut gamme dessinée pour son utilisation avec des porte-empreintes de série, individuels ou triples.

Corps Universal™ – matériel à viscosité moyenne dessiné pour son utilisation comme matériel porte-empreinte ou tout seul dans une technique d'empreinte monophasée.

Corps léger Thick n' Thin™ – matériel non affaissant, à viscosité basse qui s'empile d'abord sur le dent, puis s'écoule dans le sillon afin de capturer le dessin de détail sous-gingival.

Instructions pour prendre des empreintes

1. Appliquer l'adhésif pour porte-empreintes *Correct VPS™* au porte-empreinte et laisser sécher à l'air pendant 5 minutes.
2. Charger le mastic de mélange automatique, le corps universel et / ou la cartouche(s) de corps léger *Thick n' Thin* dans un doseur(s).
3. Enlever les bouchons et extruder un pouce de matériel pour vous assurer de dispenser des quantités pareilles de matériel.
4. Attacher les bouts de mélange aux cartouches. Attacher un bout intra-buccal au bout de mélange du matériel à laver (corps léger ou universel *Thick n' Thin*).
5. Dispenser le mastic de mélange automatique *Correct Plus* Fast Set ou le corps universel dans le porte-empreinte pendant le seringage du corps léger ou universel *Thick n' Thin* autour de la préparation(s). Le temps de travail est de 60 secondes.
6. Laisser rester le porte-empreinte.
7. Retenir l'empreinte dans sa position pendant 2 minutes.
8. Enlever l'empreinte de la bouche.
9. Rincer soigneusement avec de l'eau et du désinfectant.
10. Lors du coulage d'un modèle, attendre 15 minutes avant de procéder.